



Bořivojova 58, 130 00 Praha 3


Telefon: 222 718 996

Telefon + fax: 222 720 747

E-mail: galop@galop.cz


## OPTRON PCT III

### Popis ovládání

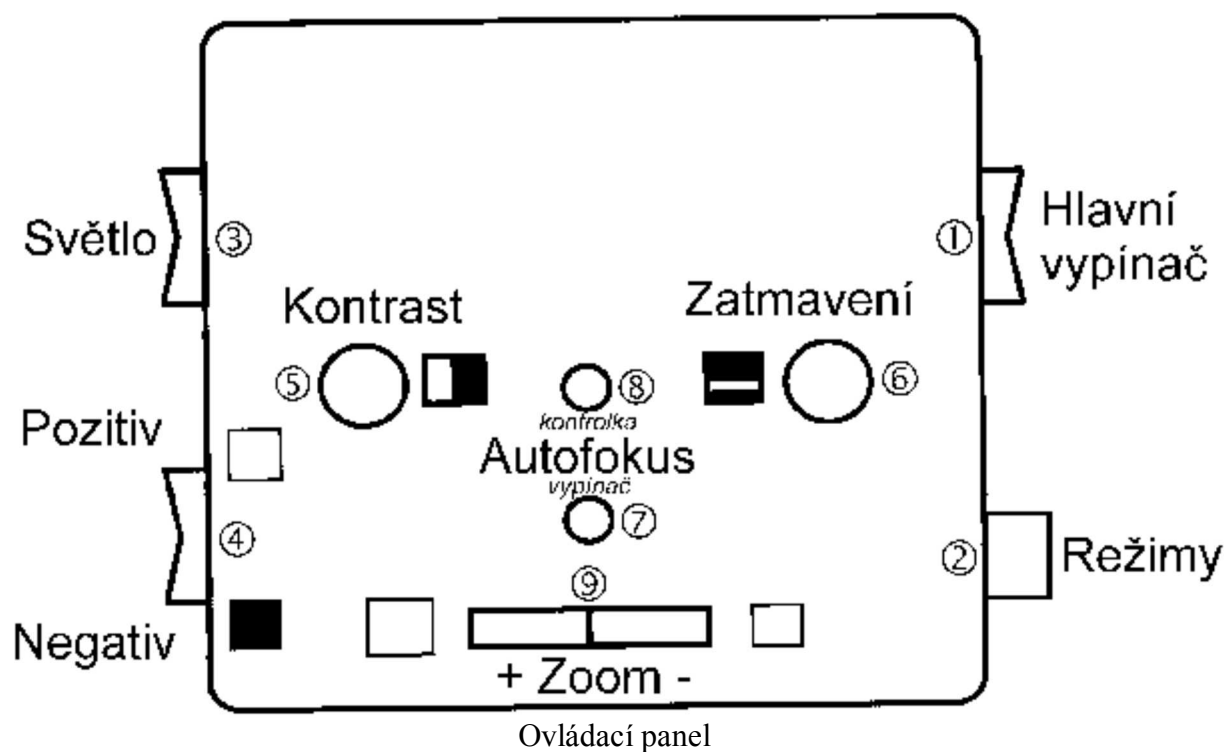

1. Hlavní vypínač
2. Přepínač režimu zobrazení (plnobarevné / černobílé / žlutočerné / zelenočerné / modročerné / fialovočerné)
3. Vypínač lampičky
4. Přepínač negativ - pozitiv \*
5. Nastavení kontrastu \*
6. Nastavení zatmavení (výběr řádku) \*
7. Vypínač automatického ostření (Autofokus)
8. Kontrolka automatického ostření (Autofokus)
9. Nastavení zvětšení (Zoom)

\* Tyto ovládací prvky slouží k ovládání dvoubarevných režimů, v plnobarevném režimu nemají žádnou funkci.

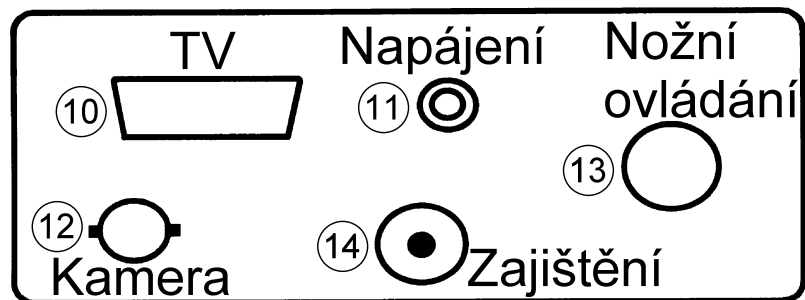

Zadní panel

10. Výstup na TV (zde připojte dodaný kabel Canon 9 - SCART)
11. Vstup napájení (používejte výhradně originální adaptér!)
12. Výstup z kamery (BNC konektor - pouze plnobarevný režim)
13. Vstup z nožního ovládání zvětšování (není součástí standardní dodávky)
14. Šroub pro zajištění polohy ovládacího panelu

### Práce do dálky

- a. Sejmeme čočku ze spodní části kamerové hlavy lupy.
- b. Čočku odložíme na magnetické držáky na horní části kamerové hlavy lupy.
- c. Otočíme kamerovou hlavu požadovaným směrem.
- d. Navolíme nejmenší zvětšení a vyhledáme požadovaný objekt, který pak zvětšíme do požadované velikosti.

### Křížový stolek

Křížový stolek umožňuje snadný pohyb se zvětšovaným textem

- a. při poloze páky v přední části stolku **vlevo** všemi směry,
- b. v poloze **uprostřed** pouze horizontálně (vlevo a vpravo) a
- c. při přesunutí páky **vpravo** je stolek zajištěn a nelze s ním pohybovat žádným směrem.