



Orbit Writer™ rychlý start

Orbit Writer je kompaktní Braillovská klávesnice, která nevidomým nebo slabozrakým uživatelům umožňuje přístup ke všem funkcím počítače nebo chytrého telefonu, jako je prohlížení webových stránek, e-mail a textové zprávy.

Tato příručka obsahuje základní pokyny k používání zařízení Orbit Writer. Úplnější pokyny a informace naleznete v uživatelské příručce Orbit Writer.

Obsah balení

Součástí balení jsou následující položky:

- Klávesnice Orbit Writer
- USB kabel (USB-A na Micro-B)

Umístění kláves

Normální orientace klávesnice je taková, že nejširší klávesa je uprostřed směrem k vám. Širší klávesa uprostřed je Mezerník, klávesa vlevo je BOD 7 a klávesa vpravo je BOD 8.

Šest Braillovských kláves je umístěno u okraje zařízení, který je od vás nejvíce vzdálen. Počínaje zleva jsou to BOD 3, BOD 2, BOD 1, BOD 4, BOD 5 a BOD 6. Tyto klávesy slouží k psaní Braillova písma a k zadávání příkazů. Uprostřed přístroje se nachází navigační růžice se čtyřmi směrovými tlačítky (Šipky nahoru, dolů, vlevo a vpravo) a tlačítkem Zvolit.

Port Micro-USB se nachází na levé straně zařízení. Slouží k nabíjení a připojení k počítači nebo smartphonu.

Nabíjení zařízení

Před prvním použitím nebo během něj doporučujeme zařízení plně nabít. Chcete-li baterii nabít, zapojte malý konec dodaného kabelu do portu USB tak, aby dva kolíky na ploché straně směřovaly nahoru. Druhý konec kabelu zasuňte do jakékoli vhodné nabíječky USB nebo do portu USB počítače.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte současně Šipku nahoru a dolů po dobu jedné sekundy, dokud neucítíte krátkou vibraci. Pokud je zařízení již zapnuté, stisknutím a podržením Šipky nahoru a dolů po dobu jedné sekundy jej vypnete. To je signalizováno dlouhou vibrací.

Připojení k telefonu nebo počítači

Orbit Writer lze připojit k počítačům a mobilním zařízením a získat přístup ke všem jejich funkcím a vlastnostem. Níže je uveden jednoduchý popis kroků pro připojení. Úplné informace naleznete v uživatelské příručce.

1. Zapněte Orbit Writer současným stisknutím Šipek nahoru a dolů. Ucítíte krátkou vibraci

2. Orbit Writer můžete připojit k více zařízením. Každé spojení má svůj vlastní kanál. Kanál 1 je výchozí a je již vybrán. Párování na kanálu 1 povolte stisknutím a podržením kláves Mezerník + Šipka doleva + BOD 1, dokud neucítíte krátkou vibraci. Informace o použití ostatních kanálů naleznete v uživatelské příručce.
3. V telefonu nebo počítači vyhledejte dostupná zařízení Bluetooth a najděte zařízení „Orbit Reader 20 XXXX“, kde XXXX jsou poslední 4 číslice sériového čísla zařízení Orbit Writer, a zahajte párování. Zařízení Orbit Writer po úspěšném spárování odpoví jedním krátkým impulsem.

V zařízeních se systémem iOS přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver a zapněte VoiceOver. Poté přejděte na položku Braillovo písmo a vyberte ji. V seznamu dostupných braillových displejů vyhledejte položku „Orbit Reader 20“, za kterou následují poslední čtyři číslice sériového čísla vašeho zařízení Orbit Writer, a vyberte ji.

U zařízení se systémem iOS odpoví Orbit Writer třemi krátkými vibracemi. První krátká vibrace signalizuje úspěšné spárování a další dvě signalizují úspěšné spojení se zařízením iOS. Po spárování a připojení je důležité zařízení iOS nejprve zamknout a odemknout, než s ním začnete Orbit Writer používat. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Při zamykání nebo odemykání zařízení se systémem iOS Orbit Writer dvakrát krátce zavibruje, což signalizuje připojení nebo odpojení..

Poznámky:

1. Pokud se připojení nezdaří, odstraňte spárování s Orbit Writerem ze zařízení a zkuste výše uvedené kroky provést znovu.
2. K zařízení Orbit Writer lze pomocí Bluetooth současně spárovat až pět zařízení. Chcete-li použít jiný kanál než kanál 1 podívejte se do seznamu zkratek nebo do příručky.
3. Pokud je Orbit Writer již zapnutý a smartphone se probudí (v důsledku oznámení nebo stisknutí tlačítka), okamžitě se znovu připojí.
4. Pokud je zařízení iOS již probuzené a Orbit Writer je zapnut, automaticky se znovu připojí k naposledy použitému zařízení. Opětovné připojení může trvat až 10 sekund.

Další informace

Nejnovější informace, tipy pro řešení problémů, pokyny pro aktualizaci softwaru, informace o péči a používání naleznete na webové stránce podpory Orbit Writer (v AJ) na adrese: <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-writer-support/>.

V případě dalších otázek nebo problémů, které nejsou uvedeny v této stručné příručce nebo v uživatelské příručce, se obraťte na distributora, u kterého jste zakoupili zařízení Orbit Writer.