

# Přenosná kamerová lupa

# SAPPHIRE™

## Uživatelská příručka



Freedom Scientific  
GALOP, s.r.o.

Anglický originál vydala společnost

Freedom Scientific  
11800 31st Court North  
St. Petersburg, Florida 33716-1805  
USA  
<http://www.FreedomScientific.com>

v prosinci 2008.

Český překlad vydala společnost

GALOP, s.r.o.  
Řehořova 14  
130 00 Praha 3  
Česká Republika  
<http://www.galop.cz>

v září 2010.

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení společnosti Freedom Scientific nebo GALOP sro.

Copyright © 2008 Freedom Scientific, LLC. Všechna práva vyhrazena.

Translation © 2010 GALOP sro.

SAPPHIRE™ je obchodní značka společnosti Freedom Scientific ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

<b>Přehled</b> .....	<b>4</b>
Indikátor baterie .....	6
<b>Úvod</b> .....	<b>8</b>
Obsah balení .....	9
Bezpečnost a údržba .....	10
<b>Rychlý start</b> .....	<b>12</b>
Dobíjení baterie .....	12
Otevření lupy SAPPHIRE .....	14
Zapnutí a vypnutí lupy SAPPHIRE .....	17
Ikona stavu baterie .....	18
<b>Čtení s lupou SAPPHIRE</b> .....	<b>19</b>
Čtecí pozice .....	21
<b>Psaní s lupou SAPPHIRE</b> .....	<b>23</b>
Otevření stojanu pro psaní .....	23
<b>Popis přístroje</b> .....	<b>26</b>
<b>Připojení lupy SAPPHIRE k televizoru</b> .....	<b>33</b>
<b>Používání lupy SAPPHIRE</b> .....	<b>34</b>
Výběr video režimu .....	34
Aktivace video režimů .....	35
Výběr video režimu .....	37
Resetování video režimů .....	37
Náhled všech video režimů .....	37
Zvětšení obrazu .....	38
Fixace obrazu .....	38
<b>Video režimy</b> .....	<b>39</b>
<b>Servis a podpora</b> .....	<b>41</b>
Odstraňování problémů .....	42


## Přehled


Následující tři strany obsahují popis a umístění součástí lupy SAPPHIRE™ a funkci indikátoru baterie.

Pro více informací nahlédněte do kapitoly *Popis přístroje* na straně 26.

Bližší informace o nabíjení, otevírání a zapínání lupy SAPPHIRE najdete na stranách 12, 14 a 17 v kapitole *Rychlý start*.

**Poznámka:** Před prvním použitím lupy SAPPHIRE musíte přístroj nabít. Baterie se nabíjí rychleji, je-li lupa vypnuta. Pro úplné nabití před prvním použitím počítejte nejméně se čtyřmi hodinami. Pro podrobnosti o nabíjení si přečtěte informace na stranách 12 a 18.

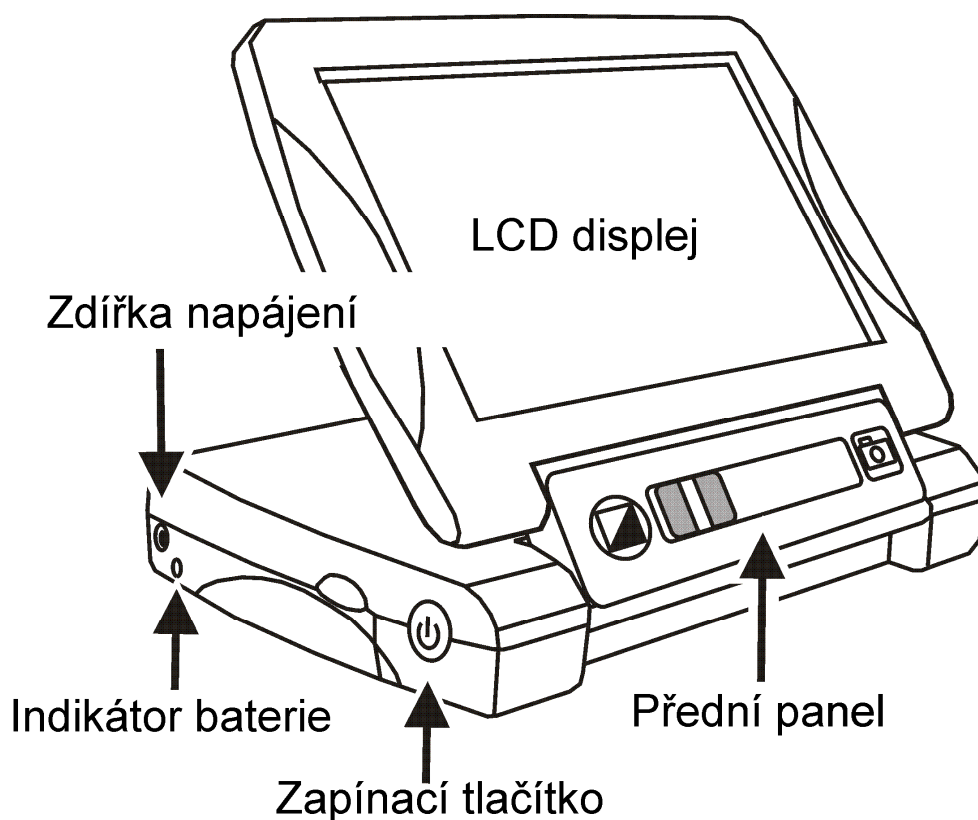

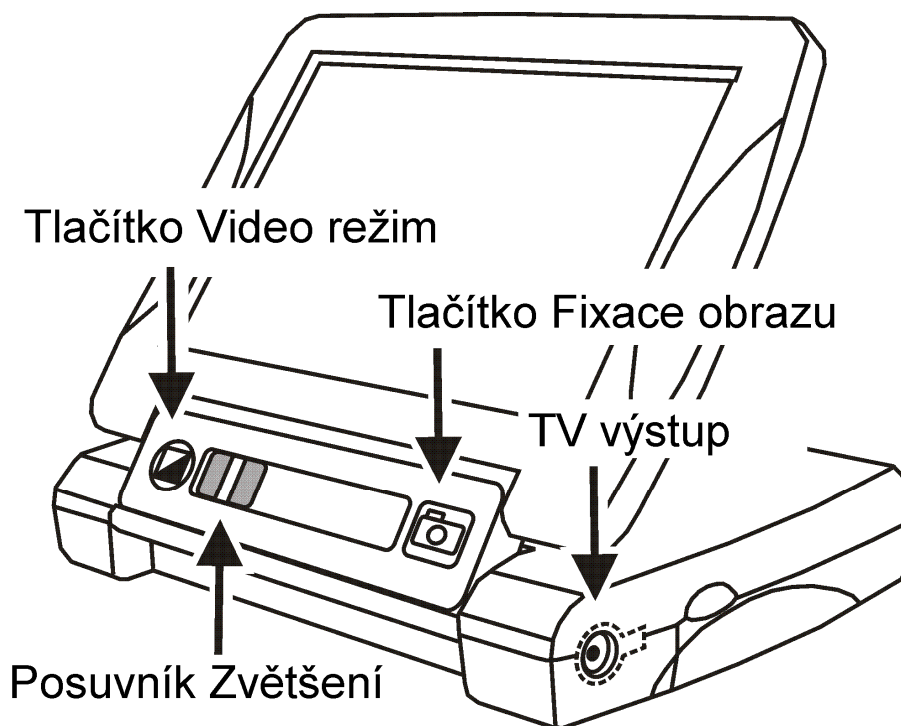

## Indikátor baterie

### Stav ukazatele

### Význam

zelená – svítí

Baterie jsou nabité – napájecí adaptér je připojen

zelená – bliká

Baterie se dobíjí – napájecí adaptér je připojen

červená – bliká

Nízký stav baterií

červená – svítí

Chyba – vypojte napájecí adaptér, vyčkejte několik vteřin a zapojte jej znovu

nesvítí

Běžný provoz – baterie jsou nabité, napájecí adaptér není připojen, nebo je lupa vypnuta

Blahopřejeme Vám k zakoupení lupy SAPPHIRE! Tato přenosná kamerová lupa vám umožňuje 3,4x až 16x zvětšit tištěný text. Lupa byla navržena s přihlédnutím k praktickým potřebám osob s makulární degenerací, glaukomem, pigmentovou retinitidou, kataraktou a dalšími onemocněními, jež způsobují zrakové postižení.

SAPPHIRE je snadno ovladatelná, a to i pro osoby, jež nejsou zvyklé pracovat s kompenzačními pomůckami. Lupu zapnete jedním tlačítkem, položíte ji na předmět a dle své potřeby upravíte stupeň zvětšení žlutým posuvníkem **Zvětšení**, a na displeji si prohlédnete zvětšený obraz.

Lupa SAPPHIRE má jasný vysoce kontrastní širokoúhlý LCD displej s úhlopříčkou o velikosti 18 cm, nabízí 23 různých video režimů, dobíjecí baterii a stojan pro psaní. V případě potřeby též můžete lupu SAPPHIRE připojit k televizoru a získat tak větší zobrazovací plochu. Ergonomický design lupy jí činí přenosnou a snadno použitelnou.

## **Obsah balení**

Před prvním použitím lupy SAPPHIRE vyjměte z krabice všechny součásti a zkontrolujte je. Balení obsahuje následující položky:

- přenosná kamerová lupa SAPPHIRE
- napájecí adaptér a kabel
- videokabel pro připojení k televizoru
- cestovní pouzdro a popruh přes rameno
- hadřík na čištění čočky
- tato uživatelská příručka

## Bezpečnost a údržba

Pro uchování lupy SAPPHIRE v dobrém stavu dodržujte prosím následující pokyny:

- Před používáním si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku.
- Nepokoušejte se SAPPHIRE opravit nebo otevřít či sejmout kryty. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, jež by mohl opravit sám uživatel.
- Nevystavujte SAPPHIRE vysoké vlhkosti a udržujte přístroj mimo dosah deště a jiných tekutin. Neponořujte SAPPHIRE do vody.
- Používejte SAPPHIRE pouze v prostředí s teplotou od 10° do 40°C.
- Neskladujte SAPPHIRE v prostředí s extrémní teplotou, například v zaparkovaném autě.
- Nepoužívejte hrubou sílu při zapojování konektoru do zdírek na přístroji. Všechny odpovídající konektory by měly do zdírek snadno zapadnout.
- Pro dobíjení baterie používejte výhradně napájecí adaptér, jenž byl přiložen k SAPPHIRE. Použitím jiných adaptérů můžete přístroj poškodit.
- Než začnete čistit displej nebo kameru lupy SAPPHIRE, vypněte zařízení, vypojte jej z přívodu elektrického proudu, poté aplikujte malé množství neabrazivního čistícího prostředku (viz níže) na měkký hadřík, který nepouští vlas (ne papírové utěrky), a jemně otřete.

**VAROVÁNÍ:** Nevystavujte displej nadměrnému tlaku. Nestříkejte čistícím prostředkem ve spreji přímo na displej. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující následující přísady: aceton, ethylalkohol, ethyl-acetát, amoniak nebo chlormethan.

- Před čištěním ostatních částí lupy SAPPHIRE se ujistěte, že je vypnutá z přívodu elektrického proudu. Pro čištění použijte lehce navlhčený měkký čistý hadřík s vodou nebo jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla, brusné látky ani aerosolové spreje.

## Dobíjení baterie

**Poznámka:** Před prvním použitím lupy SAPPHIRE musíte přístroj nechat nabít. Baterie se nabíjí rychleji, je-li lupa vypnuta.

Pro dobíjení baterie postupujte takto:


1. Zapojte malý konec napájecího adaptéru do zdířky napájení. Zdířka napájení je umístěna na stejné straně přístroje jako zelené tlačítko **Zapnout** (⏻) a ukazatel stavu baterie, jak je uvedeno v ilustraci na následující straně.
2. Zapojte opačný konec napájecího adaptéru do standardní zásuvky.

Ukazatel stavu baterie, dioda umístěná vedle zdířky napájení, indikuje nabíjení zeleným blikáním. Bližší informace najdete v kapitole

*Indikátor baterie na straně 6.*

3. Když je baterie nabitá, ukazatel stavu baterie přestane blikat a svítí zeleně. Odpojte SAPPHIRE od adaptéru a dioda ukazatele zhasne.

Nyní můžete vaši lupu SAPPHIRE používat po dobu nejméně čtyř hodin nepřetržitého provozu. Až se baterie začne blížit k vybití, ukazatel stavu baterie začne červeně blikat a bude potřeba baterii znovu dobít.

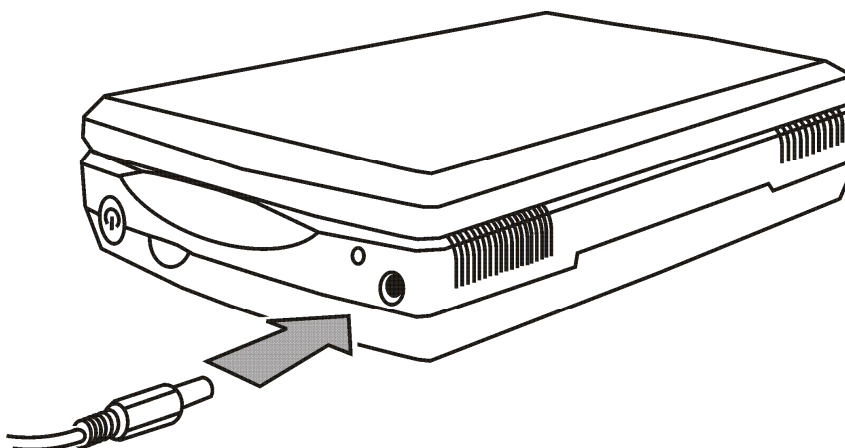


*Zapojení napájecího adaptéru do lupy SAPPHIRE*

## Otevření lupy SAPPHIRE


Pro otevření lupy SAPPHIRE postupujte takto:

1. Držte lupu SAPPHIRE v jedné ruce, nebo ji položte na rovnou plochu.
2. Palec druhé ruky vložte do prohlubně na boku přístroje a otevřete LCD displej, jak je uvedeno v následující ilustraci.

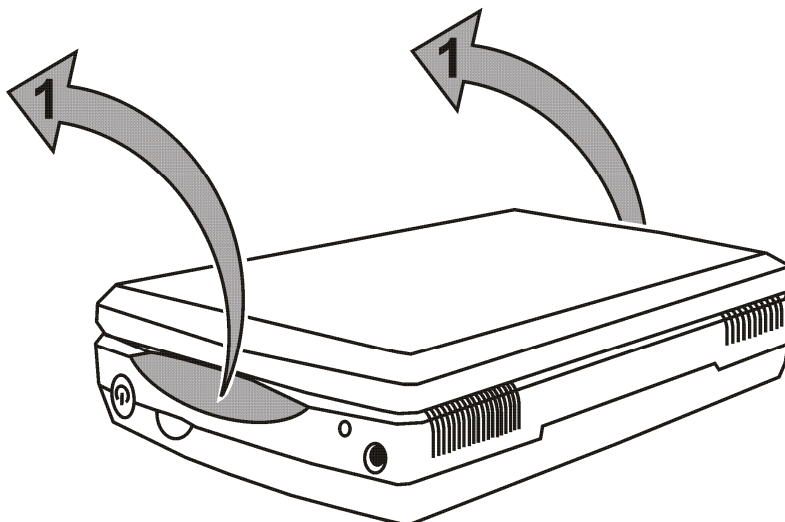


*Lupu SAPPHIRE otevřete palcem pomocí prohlubně na boku přístroje*

3. Otevřete LCD displej a pokračujte v jeho přetáčení, jak je uvedeno na následujících ilustracích.

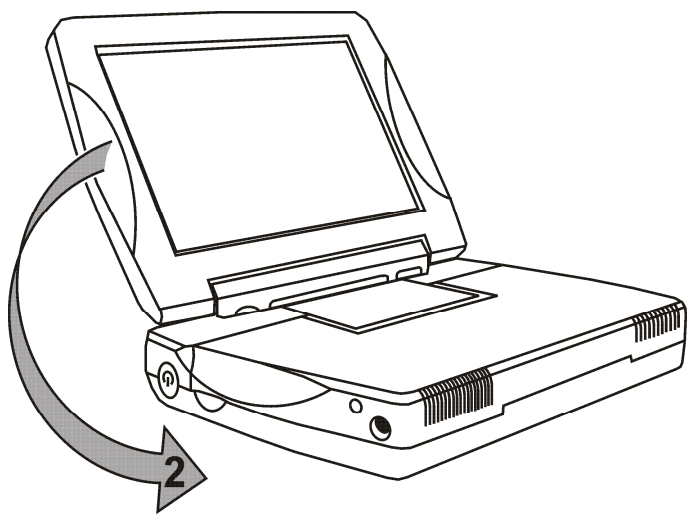


*Lupa SAPPHIRE s otevřeným displejem*

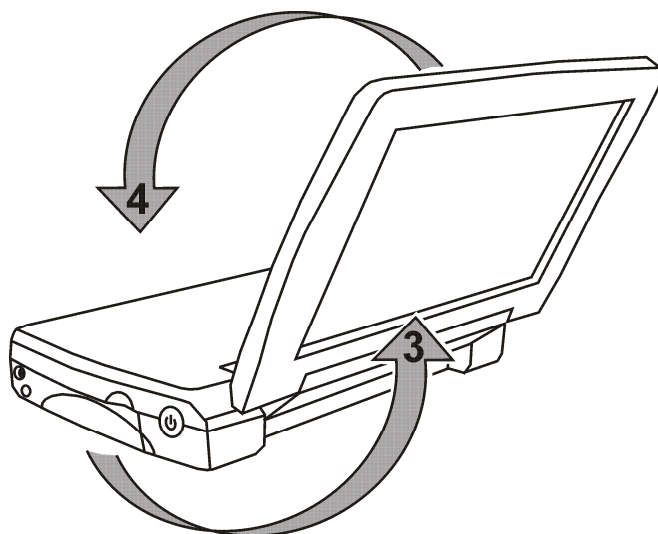


*Přetočení LCD displeje*



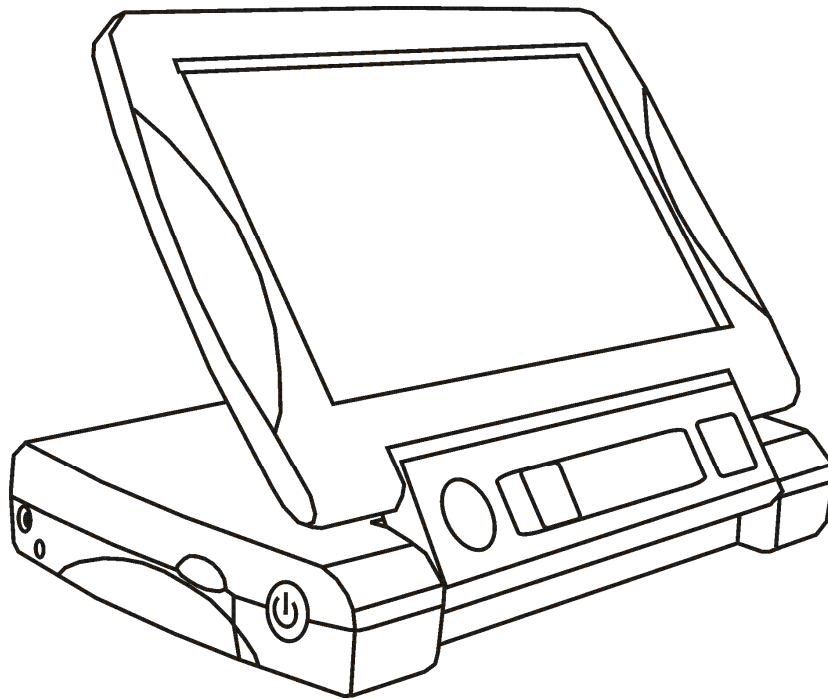

*Lupa SAPHIRE připravená ve čtecí pozici*

## Zapnutí a vypnutí lupy SAPHIRE


1. Ujistěte se, že je lupa SAPHIRE nabitá (viz kapitola *Dobíjení baterie* na straně 12).
2. Stiskněte a podržte zelené tlačítko **Zapnout**  na boku přístroje, až se objeví logo Freedom Scientific.
3. Po několika vteřinách se na displeji objeví obraz z kamery.
4. Přibližně na 10 vteřin se v pravém horním rohu displeje zobrazí ikona baterie. Pokud je stav nabití baterie 20 nebo méně procent, ikona zůstane na displeji zobrazená. Je-li baterie nabitá z více než 20 procent, ikona po 10 vteřinách zmizí.

## Ikona stavu baterie

Je-li baterie nabitá z 20 procent nebo méně, zůstane na displeji zobrazena následující ikona.




Je-li stav nabití baterie více než 20 procent, zobrazí se po zapnutí lupy SAPPHIRE přibližně po dobu 10 vteřin následující ikona.

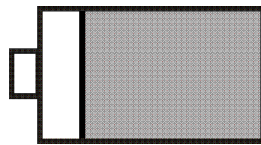


## Čtení s lupou SAPPHIRE

Po dobití baterií jste připraveni ke čtení pomocí lupy SAPPHIRE. Díky výkonným zvětšovacími funkcím přístroje můžete číst či prohlížet dopisy, jídelní lístky, mapy, fotografie, etikety, autobusové a vlakové jízdní řády, přehled televizních pořadů, recepty a mnoho dalšího.

Pro čtení dokumentů s lupou SAPPHIRE postupujte takto:

1. Otevřete lupu SAPPHIRE do jedné ze čtecích pozic, jak je uvedeno v kapitole *Čtecí pozice* na straně 21, a zapněte ji stiskem a podržením zeleného tlačítka **Zapnout** .
2. Pokud čtete knihu, dopis nebo jiný tištěný materiál, položte jej na hladký povrch, například jídelní nebo pracovní stůl.
3. Dále položte lupu SAPPHIRE přímo na text, který chcete číst. Cokoliv, co umístíte pod lupu, bude zvětšeno a zobrazí se na displeji.


4. Upravte stupeň zvětšení žlutým posuvníkem **Zvětšení** a zvolte si video režim pomocí kulatého modrého tlačítka **Video režim** .

**Tip:** Tyto funkce jsou podrobně popsány v kapitole *Popis přístroje* na straně 26.


5. Přejíždějte nebo klouzejte lupou postupně vpravo pro čtení do konce řádku. Klouzejte lupou směrem dolů a zpět vlevo pro přechod na následující řádek textu. Pokračujte ve čtení s lupou SAPPHIRE dokud Vám bude její používání pohodlné.

## Čtecí pozice

Následující ilustrace ukazují různé čtecí pozice lupy SAPPHIRE.

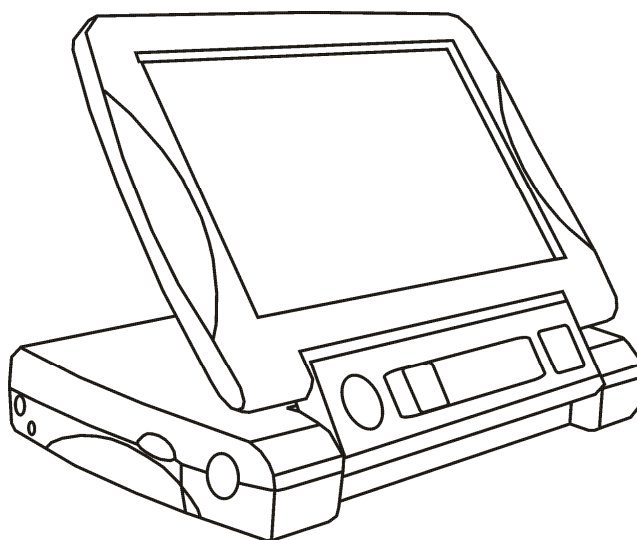

*Čtecí pozice lupy SAPPHIRE umístěné na tištěném textu*

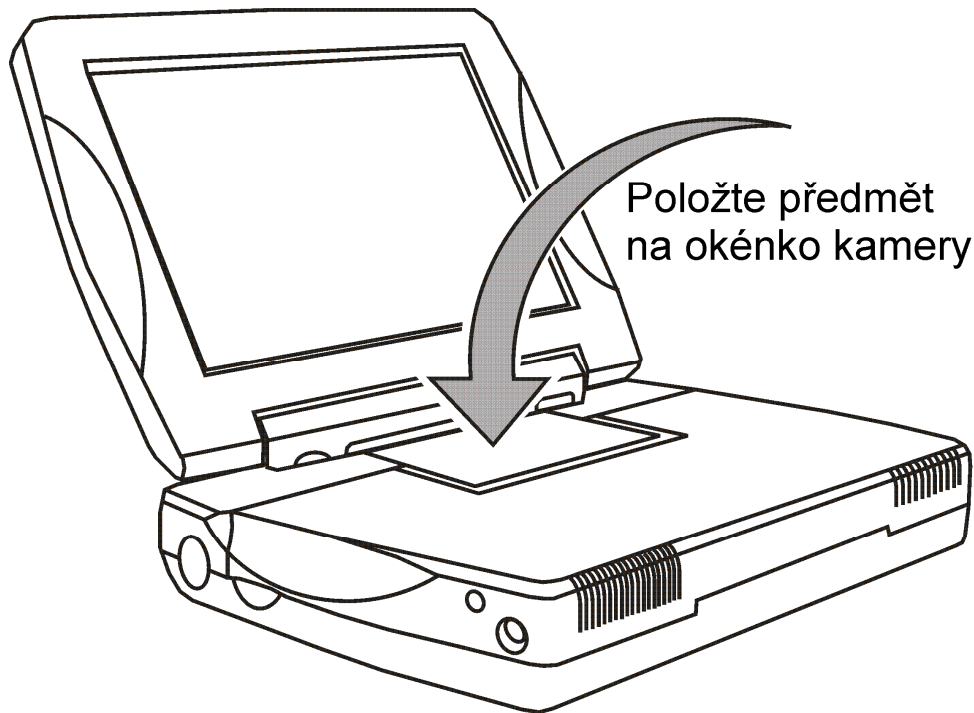

*Čtecí pozice pro drobné předměty, např. obaly léků*

## Psaní s lupou SAPHIRE


Lupu SAPHIRE můžete používat také pro podepisování dokumentů, vyplňování formulářů, psaní poznámek a mnoho dalšího.

Lupa SAPHIRE je vybavena vestavěným stojanem pro psaní. Stojan vyzdvihne část přístroje a ponechá pod kamerou dostatečný prostor pro vaše prsty a tužku, pero nebo jiný drobný nástroj. Při psaní nebo práci uvidíte zvětšený obraz na displeji přístroje.


### Otevření stojanu pro psaní

Pro použití stojanu pro psaní postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je lupa SAPHIRE otevřená, jak je popsáno výše v kapitole *Otevření lupy SAPHIRE* na straně 14.
2. Vložte palec ruky do malé prohlubně na boku přístroje a zvedněte horní část přístroje s LCD displejem až zacvakne do pozice, jak je uvedeno v ilustraci na následující straně.

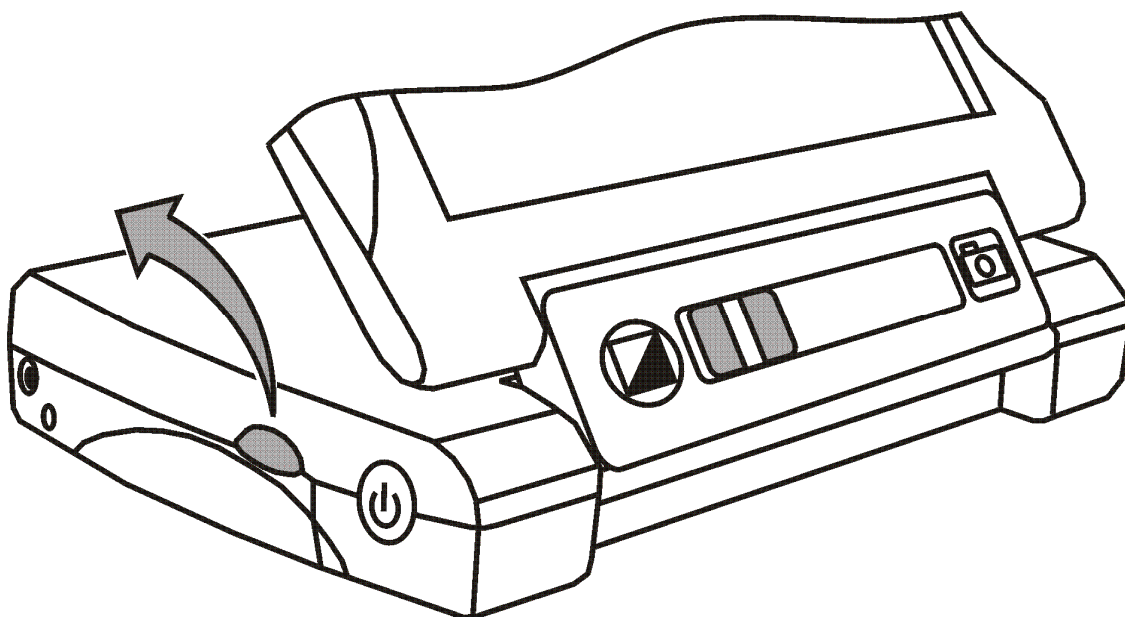

*Pro otevření stojanu pro psaní použijte malou prohlubeň*

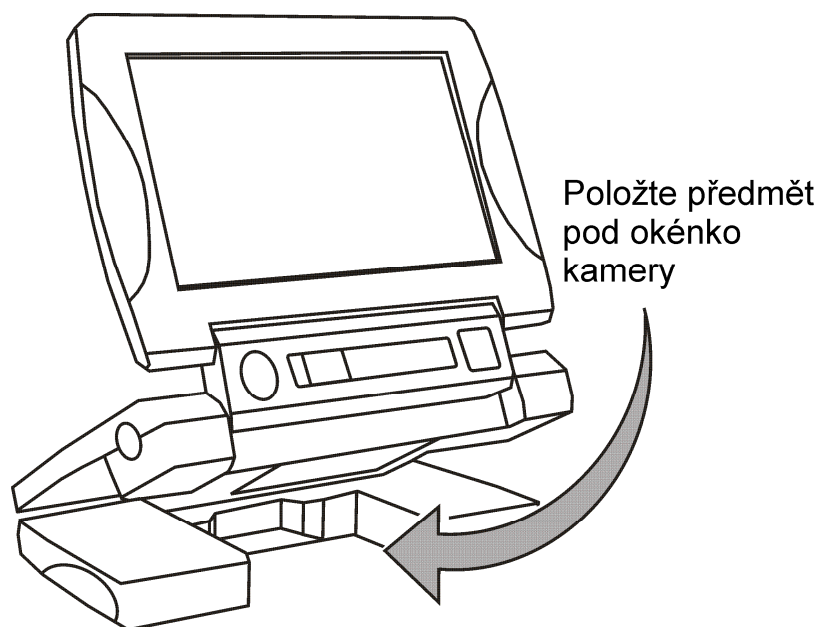


*Lupa SAPHIRE s otevřeným stojanem pro psaní*


**Poznámka:** Mezera mezi horní a dolní částí je na obrázku zvýrazněna, aby oblast pro psaní byla na obrázku jasně viditelná, v praxi je mezera a úhel rozevření kamery menší.

## Popis přístroje

Použijte ilustrace a čísla položek pro identifikaci jednotlivých součástí lupy SAPPHIRE. Bližší informace najdete u popisu položek, který začíná na straně 29.

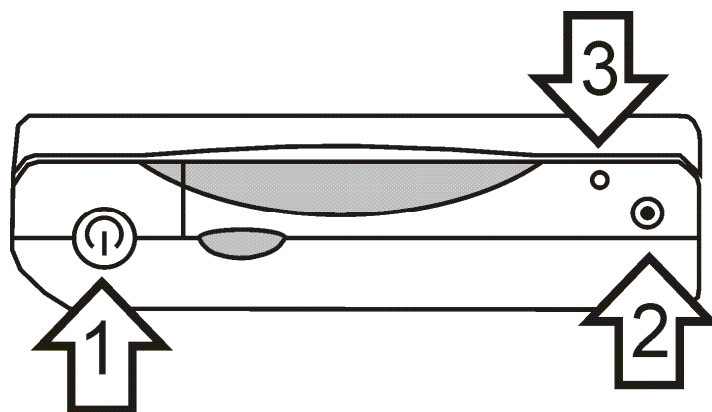


1 – Tlačítko Zapnout; 2 – Zdířka napájení; 3 – Ukazatel stavu baterie

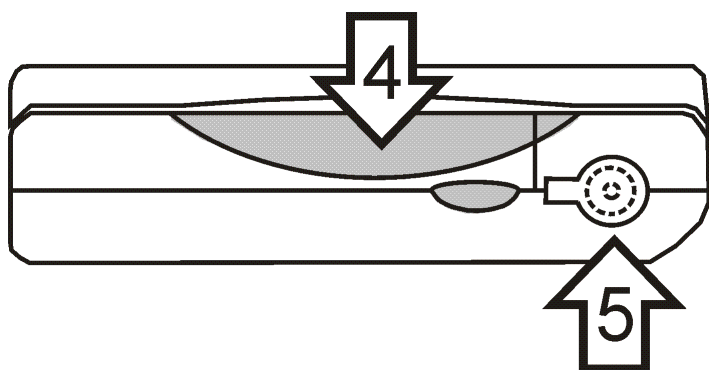


4 – Prohlubeň pro otevření přístroje

5 – Zdířka pro připojení k televizoru umístěná za krytkou


- 6 – Tlačítko Video režim
- 7 – Posuvník Zvětšení
- 8 – Tlačítko Fixace obrazu

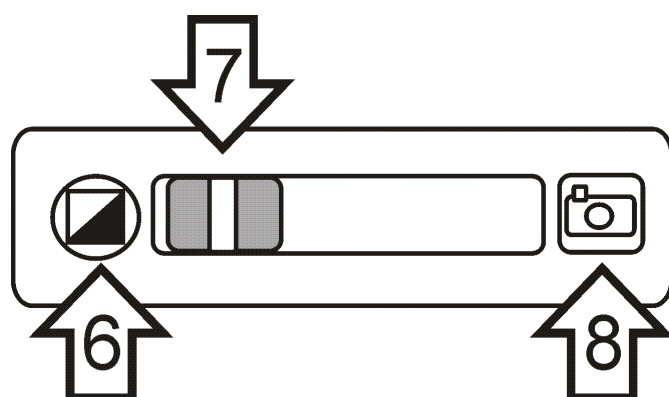

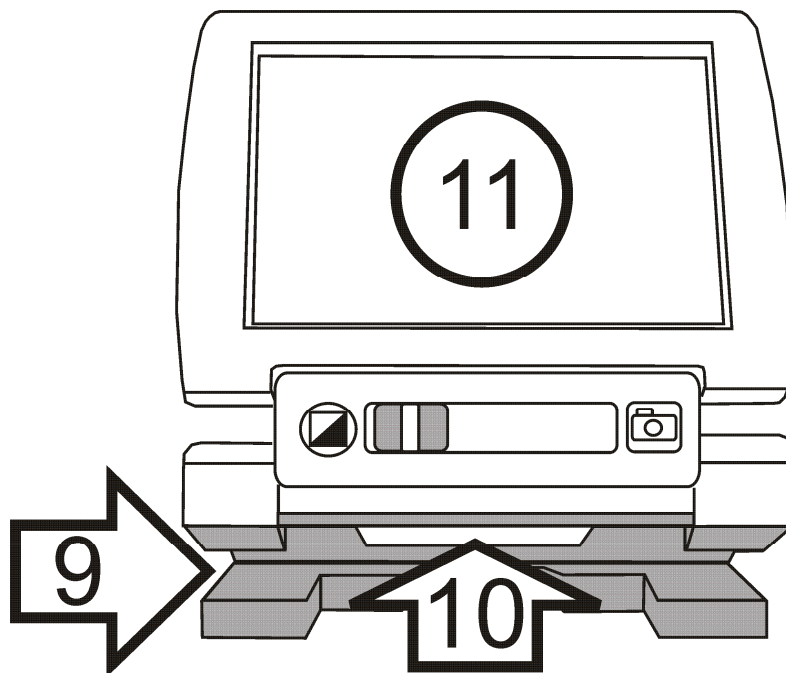

9 – Stojan pro psaní; 10 – Okénko kamery; 11 – LCD displej

## 1 – Tlačítko Zapnout (zelené)

Stiskněte zelené tlačítko **Zapnout**  pro zapnutí přístroje, dalším stiskem téhož tlačítka přístroj opět vypnete.

## 2 – Zdířka napájení

Zapojte přiložený napájecí adaptér do malé, kulaté zdířky na boku přístroje. Do této zdířky zapojujte pouze přiložený napájecí adaptér. Bližší informace o dobíjení baterie najdete na straně 12.

## 3 – Indikátor baterie

Ukazatel stavu baterie je dioda umístěná na boku přístroje, vedle zdířky pro napájení. Je-li stav baterie nízký, ukazatel bliká červeně a v pravém horním rohu LCD displeje je zobrazena ikona baterie. Když se baterie dobíjí, bliká zeleně. Ukazatel přestane blikat a svítí zeleně, je-li baterie zcela nabitá. Když odpojíte přístroj od napájecího adaptéru, přestane ukazatel svítit. Pro více informací si přečtěte kapitolu *Indikátor baterie* na straně 6.

## 4 – Prohlubeň pro otevření lupy/stojanu pro psaní


Pro vyklopení displeje a otevření lupy SAPPHIRE použijte velkou prohlubeň na boku přístroje, k otevření stojanu pro psaní použijte malou prohlubeň.

## 5 – Zdířka pro připojení k televizoru (žlutá)

Použijte tento výstup kompozitního videosignálu pro připojení lupy SAPPHIRE k televizoru. Použijte přiložený kabel se žlutými konektory.

## 6 – Tlačítko Video režim (modré)


Zvolte si kontrastní barvy, které pro čtení textu nejlépe vyhovují Vaším zrakovým potřebám.

Stiskněte modré tlačítko **Video režim**  pro přepínání mezi jednotlivými možnostmi. K dispozici je ve výchozím nastavení pět video režimů: Normální, Černá na bílé, Bílá na černé, Žlutá na modré a Žlutá na černé. První tři režimy jsou systémové barvy a nelze je změnit. Kompletní seznam dostupných video režimů najdete v kapitole *Video režimy* na straně 39.

## 7 – Posuvník Zvětšení (žlutý)

Použijte tento posuvník, umístěný na předním panelu, pro přechod mezi stupni zvětšení. Vysoký stupeň zvětšení vám může pomoci vidět drobný text nebo podrobnou ilustraci. Nízký stupeň zvětšení vám umožní vidět na displeji více textu najednou. Posuňte žlutý posuvník **Zvětšení** vpravo pro vyšší stupeň zvětšení, nebo naopak vlevo pro snížení stupně zvětšení.

## 8 – Tlačítko Fixace obrazu (červené)

Stiskněte červené tlačítko **Fixace obrazu**  pro podržení obrazu, který je právě na displeji. Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí režimu Fixace obrazu. Pro bližší informace o zachycení obrazu na displeji nahlédněte do kapitoly *Fixace obrazu* na straně 38.



## 9 – Stojan pro psaní

Otevřete stojan pro psaní nebo práci s drobnými předměty za pomoci zvětšení. Bližší informace naleznete v kapitole *Otevření stojanu pro psaní* na straně 23.

## 10 – Okénko kamery

Toto okénko chrání čočku kamery zvětšující předměty, jež se pod ní nacházejí.

## 11 – LCD displej

Přístroj má plochý širokoúhlý LCD displej o velikosti úhlopříčky 18 cm (7“). Text nebo jiné položky umístěné pod okénko kamery se zobrazí na displeji.

## Připojení lupy SAPPHIRE k televizoru


Pro větší zvětšení je možno pomocí přiloženého kabelu připojit přístroj k televizoru. Pro připojení lupy SAPPHIRE k televizoru proveďte následující:

1. Vložte žlutý CINCH konektor, který se nachází na jednom konci přiloženého video kabelu, do zdířky lupy pro připojení k televizoru.
2. Vložte CINCH konektor na video kabelu do jedné ze žlutých zdířek pro video vstup Vašeho televizoru. Pro informace o umístění těchto zdířek nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho televizoru.
3. Zapněte televizor. Je-li to nutné, přepněte na kanál odpovídající danému vstupu. Předměty, které zvětšujete, se nyní zobrazí na obrazovce televizoru i na LCD displeji lupy.

## Používání lupy SAPPHIRE

### Výběr video režimu

Video režim je předdefinovaná barevná kombinace (např. žlutý text na modrém pozadí), kterou si můžete zvolit při prohlížení předmětů pomocí lupy SAPPHIRE. K dispozici je celkem 23 různých video režimů. První tři pozice video režimu – Normální (plnobarevný), Černá na bílé a Bílá na černé – nelze změnit a jsou vždy k dispozici.





Pomocí postupu uvedeného v této kapitole můžete aktivovat a vybrat si z palety dalších 20 video režimů. Po provedení aktivace jednoho z video režimů (bližší informace naleznete v kapitole *Aktivace video režimů* na straně 35) se do daného režimu můžete přepnout stisknutím modrého tlačítka **Video režim** .


Pro rychlý náhled všech barevných kombinací a video režimů lupy SAPPHIRE si přečtěte kapitolu *Náhled všech video režimů* na straně 37, nebo se podívejte do seznamu všech video režimů na straně 39.


### Aktivace video režimů



Ve výchozím nastavení má lupa SAPPHIRE aktivováno pět základních video režimů, které můžete použít. Chcete-li používat další video režim (barevnou kombinaci), je třeba jej nejprve následujícím postupem aktivovat.

Pro aktivování video režimu proveďte následující:

1. Stiskněte a podržte najednou modré tlačítko **Video režim**  a červené tlačítko **Fixace obrazu**  po dobu přibližně 8 vteřin, až se v levém dolním rohu objeví značka  nebo **X**.
2. Stiskněte modré tlačítko **Výběr režimu**  opakovaně, až najdete barevnou kombinaci, kterou si přejete aktivovat.

**Poznámka:** Pokud se vedle čísla pozice v levém dolním rohu displeje objeví značka , znamená to, že je video režim aktivní a lze jej vybrat během normálního používání lupy.




Značka **X** znamená, že je daný video režim neaktivní. Během normálního používání lupy neaktivní režim nelze vybrat stiskem tlačítka **Video režim** .

3. Pro aktivaci video režimu stiskněte tlačítko **Fixace obrazu** . Na displeji se nyní objeví značka .


**Poznámka:** Pro deaktivaci video režimu stiskněte opět tlačítko **Fixace obrazu**, až se objeví značka **X**.

4. Pro aktivaci dalších video režimů zopakujte podle potřeby kroky 2 a 3.

**Poznámka:** Video režimy na prvních třech pozicích (Normální, Černá na bílé a Bílá na černé) nelze změnit nebo deaktivovat.

5. Po ukončení aktivace video režimů současně stiskněte a podržte modré tlačítko **Video režim**  a červené tlačítko **Fixace obrazu**  po dobu přibližně 8 vteřin, až na displeji zmizí značka  nebo **X**.


## Výběr video režimu

Pro přepnutí do aktivního video režimu během normálního používání lupy stiskněte opakovaně modré tlačítko **Video režim** , až se požadovaný režim zobrazí na displeji.

## Resetování video režimů

Pro obnovení výchozího nastavení s pěti předdefinovanými video režimy stiskněte a podržte zelené tlačítko **Zapnout**  po dobu přibližně 10 vteřin.

## Náhled všech video režimů

Pro rychlý náhled všech dostupných video režimů, jež jsou v lupě SAPPHIRE k dispozici, stiskněte a podržte modré tlačítko **Výběr režimu**  a současně pohněte žlutým posuvníkem **Zvětšení**.


## Zvětšení obrazu

- Pro zvýšení stupně zvětšení displeje pohněte žlutým posuvníkem **Zvětšení** směrem doprava.
- Pro snížení stupně zvětšení displeje pohněte žlutým posuvníkem **Zvětšení** směrem doleva.

## Fixace obrazu

Fixace obrazu na LCD displeji může být užitečná například pro čtení etiket na zboží v obchodě. Stačí podržet lupu SAPPHIRE v blízkosti předmětu, zachytit obraz a následně si lupu můžete pohodlně přiblížit pro čtení, přesně tak, jak potřebujete.

Pro fixaci aktuálního obrazu na LCD displeji proveďte následující:

1. Stiskněte červené tlačítko **Fixace obrazu**  na přední straně přístroje.
2. Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí režimu fixace obrazu.

## Video režimy

Lupa SAPPHIRE poskytuje celkem 23 různých video režimů. Použijte následující seznam video režimů pro vyzkoušení a výběr barevné kombinace, která vám bude nejlépe vyhovovat. Pro informace o tom, jak aktivovat jednotlivé video režimy nahlédněte do kapitoly *Aktivace video režimů* nebo *Výběr video režimu* na stranách 35 a 37. Pro obnovení výchozího nastavení video režimů si přečtěte kapitolu *Resetování video režimů* na straně 37.

Lupa SAPPHIRE poskytuje následující video režimy:

- Normální – plnobarevný režim (vždy k dispozici).
- Černá na bílé – vysoce kontrastní pozitivní obraz (vždy k dispozici).
- Bílá na černé – vysoce kontrastní negativní obraz (vždy k dispozici).
- Žlutá na černé – ve výchozím nastavení (obnoví se po resetování video režimů).

- Žlutá na modré – ve výchozím nastavení (obnoví se po resetování video režimů).
- Modrá na žluté
- Černá na žluté
- Červená na černé a Černá na červené
- Zelená na černé a Černá na zelené
- Modrá na černé a Černá na modré
- Purpurová na černé a Černá na purpurové
- Červená na bílé a Bílá na červené
- Zelená na bílé a Bílá na zelené
- Modrá na bílé a Bílá na modré
- Purpurová na bílé a Bílá na purpurové

## Servis a podpora

**Poznámka:** Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, jež by mohl opravit sám uživatel. Jakýkoliv neautorizovaný pokus o opravu nebo výměnu součástí přístroje automaticky zruší záruku výrobku.

Pro technickou pomoc k lupě SAPPHIRE se můžete obrátit na firmu GALOP sro., výhradního distributora výrobků společnosti Freedom Scientific pro Českou republiku.

Než se obrátíte na technickou podporu, nahlédněte prosím do následující kapitoly Odstraňování problémů, kde najdete návod na rychlé vyřešení nejběžnějších problémů.

## Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Obrazovka je prázdná.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý. Ujistěte se, že text/předmět, který si přejete zvětšit, je správně umístěný pod okénkem kamery. Snižte úroveň zvětšení. Dobijte baterii.
Přístroj nelze zapnout.	Dobijte baterii.
Obraz na přístroji je tmavý nebo zdeformovaný.	Ujistěte se, že je SAPPHIRE umístěna na stránce, kterou čtete, naplocho.
Ukazatel stavu baterie bliká červeně.	Dobijte baterii.
Ikona stavu baterie je stále zobrazena na LCD displeji.	Dobijte baterii.

Problém	Řešení
Ukazatel stavu baterie svítí červeně, když je připojený napájecí adaptér.	Došlo k chybě baterie. Odpojte napájecí adaptér a opět jej připojte. Dobijte baterii po dobu nejméně 4 hodin. Pokud problém přetrvává, odpojte napájecí adaptér a zavolejte technickou podporu.
Ukazatel stavu baterie nebliká zeleně, ačkoliv je k přístroji připojen napájecí adaptér zapojený do zásuvky elektrické energie. <i>nebo</i> Baterie se nedobíjí.	Ujistěte se, že je menší konec napájecího adaptéru správně zapojen do zdířky napájení. Ujistěte se, že zásuvka elektrické energie je funkční a je v ní proud. Je-li přístroj zapojen do zásuvky se spínačem, ujistěte se, že je zásuvka zapnutá.
Na displeji jsou šmouhy a skvrny.	Vyčistěte displej a okénko kamery (umístěné na spodní straně přístroje) podle návodu v kapitole <i>Bezpečnost a údržba</i> na straně 10.

Problém	Řešení
Text je pro čtení příliš drobný.	<p>Pohněte žlutým posuvníkem <b>Zvětšení</b> směrem vpravo pro zvýšení stupně zvětšení.</p> <p>Připojte lupu SAPPHIRE pomocí přiloženého video kabelu k televizoru, na jehož větší obrazovce bude snazší text přečíst.</p>
Text je pro čtení příliš velký.	<p>Pohněte žlutým posuvníkem <b>Zvětšení</b> směrem vlevo pro snížení stupně zvětšení.</p>
SAPPHIRE je připojena k televizoru, ale na obrazovce není vidět žádný obraz.	<p>Ujistěte se, že je televizor zapnutý.</p> <p>Přepněte televizor na kanál odpovídajícího video vstupu.</p> <p>Ujistěte se, že je video kabel správně zapojen: na lupě SAPPHIRE do zdířky pro připojení k televizoru a na Vašem televizoru do správného video vstupu.</p>

**Výrobce:**



**Freedom Scientific**

Florida, USA

**Distribuce v ČR:**



**GALOP, s.r.o.**, Řehořova 14, 130 00 Praha 3

Telefon: 222 718 996 nebo 222 720 747

E-mail: [galop@galop.cz](mailto:galop@galop.cz) Internet: [www.galop.cz](http://www.galop.cz)