


<p>(1) JAS (žlutý knoflík)</p>	<p>Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte úroveň jasu obrazovky. Otáčením proti směru hodinových ručiček jas obrazovky snížíte.</p>
<p>(2) ZAMČENÍ OBRAZU (červené tlačítko)</p>	<p>Stiskem tlačítka zafixujete právě zobrazovaný obraz na obrazovce. Opakovaným stiskem se vrátíte k živému náhledu. Stiskem a podržením tlačítka přibližně 6 vteřin vstoupíte nebo opustíte Režim prohlížení.</p>
<p>(3) ZVĚTŠENÍ (černý knoflík)</p>	<p>Otáčením zvětšíte nebo zmenšíte úroveň zvětšení.</p>
<p>(4) ZAMĚŘENÍ (oranžové tlačítko)</p>	<p>Stiskněte a podržte tlačítko pro zobrazení zaměřovacího kříže na obrazovce a dočasného zrušení nastaveného zvětšení pro snazší orientaci a úpravu postavení zvětšovaného objektu. Uvolněním tlačítka se obnoví původní úroveň zvětšení.</p>
<p>(5) BAREVNÝ REŽIM (modrý knoflík)</p>	<p>Otáčením přepínáte mezi barevnými režimy.</p>
<p>(A) POKROČILÉ (černé tlačítko)</p>	<p>Černé tlačítko použijte v kombinaci s dalšími ovládacími prvky pro přístup k pokročilým funkcím kamerové lupy.</p> <p>Další informace o <i>Pokročilých funkcích</i> najdete na straně druhé straně.</p>

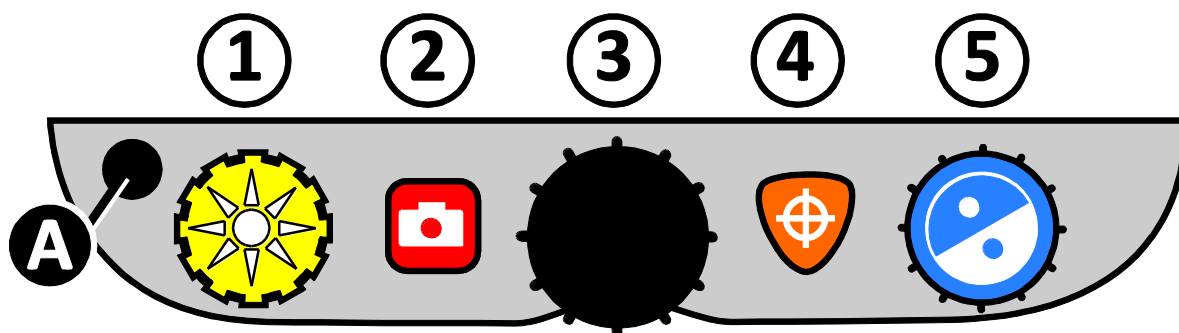

Černé tlačítko **POKROČILÉ (A)** se používá v kombinaci s dalšími ovládacími prvky pro přístup pokročilým funkcím kamerové lupy TOPAZ PHD.

Vždy nejprve **stiskněte a držte** tlačítko **POKROČILÉ (A)** a k tomu stiskněte jiné tlačítko nebo otočte knoflíkem pro spuštění pokročilé funkce.

Například pro úpravu intenzity LED osvětlení čtecího stolku **stiskněte a držte** tlačítko **POKROČILÉ (A)** a točte žlutým knoflíkem **JAS (1)**.

(A + 1) JAS (žlutý knoflík)	Točením upravujete intenzitu LED osvětlení čtecího stolku.
(A + 2) FIXACE OBRAZU (červené tlačítko)	Stiskněte a držte pro uložení aktuálního obrazu na paměťovou SD kartu. Tlačítka uvolněte po zobrazení ukládací ikonky na obrazovce. Ukládání obrázku je možné pouze, když je paměťová SD karta vložena do SD slotu.
(A + 3) ZVĚTŠENÍ (černý knoflík)	Otáčením procházíte režimem zobrazení horizontální linky, horizontální maska, vertikální linky, vertikální maska a žádné zobrazení čtecích linek ani masky.
(A + 4) ZAMĚŘENÍ (oranžové tlačítko)	Stiskněte a držte přibližně 10 vteřin pro vstup do Konfiguračního menu.
(A + 5) BAREVNÝ REŽIM (modrý knoflík)	Otáčením upravujete vzdálenost mezi čtecími linkami nebo čtecí maskou.